

110 \* 254mm

“麥迪森”

# 芭弗莎林 緩衝生理食鹽水

## “AIM” Buffer Saline

### 特性：

芭弗莎林緩衝生理食鹽水是專為隱形眼鏡配製之無菌、緩衝、等張溶液，不含任何防腐劑。

### 成分：

每ml中含有

Sodium Chloride.....7.1mg

Sodium Borate.....0.43mg

Boric Acid.....4.3mg

Distilled Water Added to Make.....1ml

### 用途：

隱形眼鏡之浸泡、沖洗、保存、中和。

### 使用方法：

- 1.用於藥水消毒法時，鏡片先用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖洗乾淨，然後浸泡於浸泡液中，戴用鏡片前再以本品將浸泡液沖淨後配戴。
- 2.用於加熱消毒法時，鏡片用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖淨，並浸泡於注滿本品之鏡片盒中，蓋緊盒蓋，然後放入加熱消毒器中消毒，俟鏡片盒冷卻後，取出鏡片使用。

### 注意事項：

- 1.使用時勿接觸瓶口，以免污染溶液。
- 2.請將本品保存於室溫下。
- 3.本品不可重覆使用。

### 包裝：

10ml塑膠瓶裝。

15ml塑膠瓶裝。

30ml塑膠瓶裝。

衛部醫器製字第004314號



醫療器材商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司  
醫療器材商地址：臺北市林森南路十號五樓  
製造業者名稱：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠  
製造業者地址：桃園市桃園區桃鶯路445-2號

5A42©