

# 易舒淨 緩衝生理食鹽水

## “AIM” Easy Clean Solution

### 特性：

易舒淨緩衝生理食鹽水是專為隱形眼鏡配製之無菌、緩衝、等張溶液，不含任何防腐劑。

### 成分：

每mL中含有：

Sodium Chloride.....	7.1mg
Sodium Borate.....	0.43mg
Boric Acid.....	4.3mg
Distilled Water Added to Make.....	1mL

### 用途：

隱形眼鏡之浸泡、沖洗、保存、中和。

### 使用方法：

1. 用於藥水消毒法時，鏡片先用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖洗乾淨，然後浸泡於浸泡液中，戴用鏡片前再以本品將浸泡液沖淨後配戴。
2. 用於加熱消毒法時，鏡片用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖淨，並浸泡於注滿本品之鏡片盒中，蓋緊盒蓋，然後放入加熱消毒器中消毒，待鏡片盒冷卻後，取出鏡片使用。

### 注意事項：

1. 使用時勿接觸瓶口，以免汙染溶液。
2. 請將本品保存於室溫下。
3. 本品不可重複使用。

### 【包裝】

- 10mL 塑膠瓶裝。
- 15mL 塑膠瓶裝。
- 30mL 塑膠瓶裝。

衛部醫器製字第004653號



醫療器材商名稱：麥迪森醫藥股份有限公司  
醫療器材商地址：台北市中正區林森南路十號5樓  
製造業者名稱：麥迪森醫藥股份有限公司 桃園廠  
製造業者地址：桃園市桃園區桃鶯路445之2號  
**ASEPTIC INNOVATIVE MEDICINE CO.,LTD**  
No.445-2, Taoying Rd. Taoyuan Dist. Taoyuan City 330,Taiwan(R.O.C.)

5A70②